

## 血液檢體作業程序參考

血清檢體 (serum) :

作業程序：

- (1) 以無菌操作法採靜脈血5-10ml (採血方式參考防疫檢體採檢手冊第32 頁)。
- (2) 室溫放置30 分鐘以上，使血液凝固。
- (3) 離心1500 轉10 分鐘，以無菌吸管將血清吸入檢體瓶內旋緊瓶蓋。
- (4) 檢體瓶上貼好寫好個人資料的標籤 (姓名、採取日期)。
- (5) 檢體處理好後置冰箱 (-80°C) 冷凍儲存。

參考資料：

1. 防疫檢體採檢手冊 (行政院衛生署疾病管制局94年2月出版)
2. 世界衛生組織對於流感A/H5型在人體檢體之採檢準則(WHO網站2004年2月6日版)